

# 第一章 EUKARE血糖监测系统

## 1.1 介绍

感谢您选择EUKARE血糖监测系统，本系统适用于居家及医疗处所，帮助糖尿病患者检测血液中葡萄糖浓度所设计的精巧、准确的血糖计。

本系统运用先进的生物电极传感器技术，只要少量的血液，十五秒内就可以精准计算出您的血糖值并显示在显示屏上。不需要计时也不需要擦拭，使用上就是如此简单。

在您使用血糖监测系统前请先详细阅读本使用手册，在手册上都有清楚图示及说明，让您可迅速地取得所需信息。

用途：EUKARE血糖监测系统必须与优速测血糖试片搭配，使用于全血中作血糖浓度的检测。此仪器适合糖尿病患者自行居家检测血糖，同时也可作为医院或诊所对患者的血糖检测。



**警告：使用本系统量测血糖时，请先阅读使用说明书并练习操作。**

**本系统仅适用血糖检测参考，不可做为医疗诊断工具。**

## 1.2 包装内容

当您打开本产品包装时，请先检查下列项目是否完整无缺，如果有任何缺漏，请联络各经销商或向原购买处所更换。

项次	品名[产品编号]	数量
一	EUKARE血糖计[PM000301]	1
二	EUSURE血糖试片10支罐装 [PS001001]	1
三	EUSURE血糖计设定检查卡[PA001201]	1
四	采血器 XD [PA000403]	1
五	采血针 28 G XD[PA000301]	10
六	锂电池 3V[PA000101]	1
七	中标品管液[PA000601]	1
八	尼龍旅行包[PA000703]	1
九	EUKARE 使用说明书中文版(繁)[PA001801]	1
十	EUKARE 快速使用指引中文版(繁)[PA001901]	1
十一	EUSURE 试片说明书中文版(繁) [PA001102]	1

选购品(不包括在本产品包装内，如有需要可向原购买处所购买)

EUSURE检验试片50支盒装中文版(繁)[PS001206]

高标品管液[PA000603]

低标品管液[PA000604]





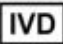





EUKARE传输线[PA000202]

EUKARE无线接收器[PA002001]

EUKARE血糖管理软件[PA002101]

EUKARE血糖管理软件使用手册[PA002201]

### 1.3 产品图标及说明

	不可重复使用		请参阅使用说明书
	保持干燥		警告
	体外诊断		试片保存温度限制(4-30 )
	使用期限		避免日晒
	批号		产品编号
	欧体代表		BF类设备